




# SHERAMAGIC-GREEN

## Empfohlene Mischungsverhältnisse von Einbettmassenpulver : SHERALIQUID

Unsere Empfehlungen basieren auf Testergebnissen unseres Labors und sind Richtwerte. Verschiedene Faktoren vor Ort wie z. B. die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder die Einstellungen des Rührgerätes können die Ergebnisse beeinflussen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Für einen Einbettmassenbeutel à 180 g benötigen Sie insgesamt 34 ml Flüssigkeit. Die Abmischung der Flüssigkeit entnehmen Sie bitte dieser Tabelle:

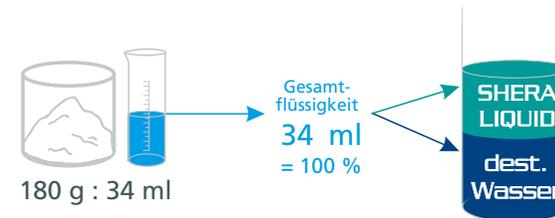

### Metalle

### Kronen und Brücken

#### SHERALIQUID + dest. Wasser

modelliert in Wachs

27 - 31 ml + 7 - 3 ml  
80 - 90 % 20 - 10 %

(locker) geätzt in Wachs

20 - 24 ml + 14 - 10 ml  
60 - 70 % 40 - 30 %

(locker) geätzt in Kunststoff

29 - 34 ml + 5 - 0 ml  
85 - 100 % 15 - 0 %