



Vertex Acrybond 75 ml

Charakteristika a použití:

Vertex Acrybond vytváří chemickou vazbu mezi akrylovými zuby (nebo jejich akrylovými částmi) a mezi metylmetakrylátovou pryskyřičnou bází zubní náhrady. Snižuje pravděpodobnost vypadávání zubů z dentální náhrady a zlepšuje pevnost spojení mezi zubem a pryskyřičnou bází.

Rizika a bezpečnostní předpisy:

Vertex Acrybond obsahuje metylmetakrylát a aceton ♦ snadno zápalný ♦ dráždí oči, dýchací cesty a pokožku - používejte ochranné prostředky ♦ možný vznik zvýšené citlivosti při kontaktu s pokožkou ♦ chraňte před dětmi ♦ pracujte na dobře větraném místě ♦ nekuřte v blízkosti, chraňte před otevřeným ohněm ♦ nelijte do kanalizace ♦ zabraňte vzniku elektrostatického náboje ♦ se zbytky přípravku zacházejte jako s chemickým odpadem.

Návod k použití

Příprava zubů před aplikací:

Vertex Acrybond se aplikuje na zuby těsně před plněním pryskyřice do kyvety nebo před litím za studena polymerizující pryskyřice. Zuby je před aplikací nutno důkladně očistit, případně styčné plochy s pryskyřicí zdrsňit speciálním nástrojem. Zuby umístíme na příslušná místa do kyvety.

Aplikace:

Vertex Acrybond nanese malým štětečkem na pryskyřičnou část zubů, která bude ve styku s metylmetakrylátovou bází zubní náhrady. Aplikujeme jednu stejnoměrnou slabou vrstvu. Ihned po nanesení Acrybondu na zuby plníme kyvetu pryskyřicí.

Podmínky skladování a likvidace:

Vždy po použití nádobku s Vertex Acrybond dobře uzavřete ♦ nádobka by měla být naplněna max. z 80% ♦ Acrybond skladujte na chladném a tmavém místě ♦ chraňte před dětmi ♦ uschovejte na dobře větraném místě ♦ skladovat v dostatečné vzdálenosti od zdroje ohně ♦ nekuřte v blízkosti, chraňte před otevřeným ohněm ♦ nelijte do kanalizace ♦ zabraňte vzniku elektrostatického náboje ♦ se zbytky přípravku zacházejte jako s chemickým odpadem.



FLAVA s.r.o., Lanškrounská 536/31, Předměstí, 56802 Svitavy, Česká republika
Tel. +420 461 533 323, Fax.: +420 461 531 129
e-mail: office@flava.cz, www.flava.cz
DIČ: CZ647 88 202