


Přímé rebaze

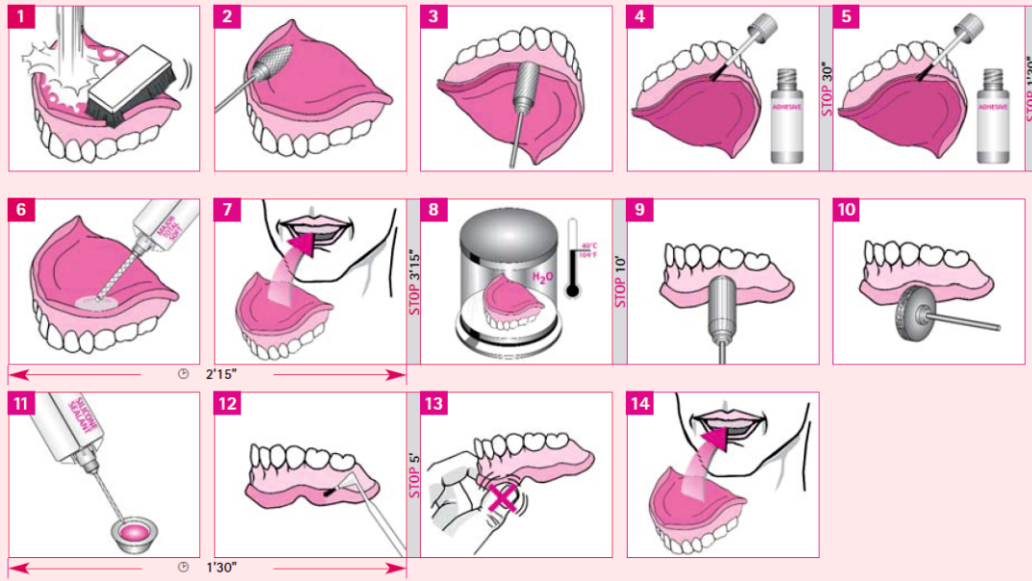


- 1) Protézu omyjte vodou a osušte.
- 2) Obruste požadovanou tloušťku vrstvy.
- 3) Zabruste vestibulárně pravoúhlou hranu.
- 4) Na zbroušené plochy naneste adhezni přípravek MTS Adhesive a nechte schnout 30“.
- 5) Zopakujte postup bodu 4, nechte schnout 1' 30“.
- 6) Naneste rovnoměrně přípravek Major Total Soft (míchací kanylu nechte v materiálu) z důvodu zamezení tvorby vzduchových bublin.
- 7) Vložte protézu do úst, nechte provést všechny pasivní a aktivní funkční pohyby. 3' 15' ponechte v ústech.
- 8) Protézu vyjměte a nechte vytvrdnout ve vodní lázni při 40°C po dobu 10 min., při pokojové teplotě po dobu 30 min.
- 9) Přebytečný materiál odstraňte pomocí rotačních nástrojů (ocelová fréзка s příčným zdvihem).
- 10) Proveďte jemné opracování přiloženým leštícím kotoučem, následné leštění pemzou jako obvykle.
- 11) Přípravek Major Total Soft Sealant naplňte do vhodné nádoby.
- 12) Pomocí štětce naneste tenkou vrstvu přípravku Major Total Soft Sealant do 1' 30“ na spojovací linii Major Total Soft (Total Soft-plast.hm.).
- 13) Major Total Soft Sealant nechte schnout 6' 30“, nedotýkejte se!
- 14) Vložte protézu do úst (finálních mechan. vlastností uzavírací silikon dosáhne po několika hodinách při teplotě úst).

Korekce:

Silikon značně obruste, opět naneste Major Total Soft.

Pouze na odkryté části plastické hmoty předtím 2 x naneste štětečkem adhezni přípravek MTS Adhesive. Nechte schnout 2 x 1' 30“.

Nepřímé rebaze

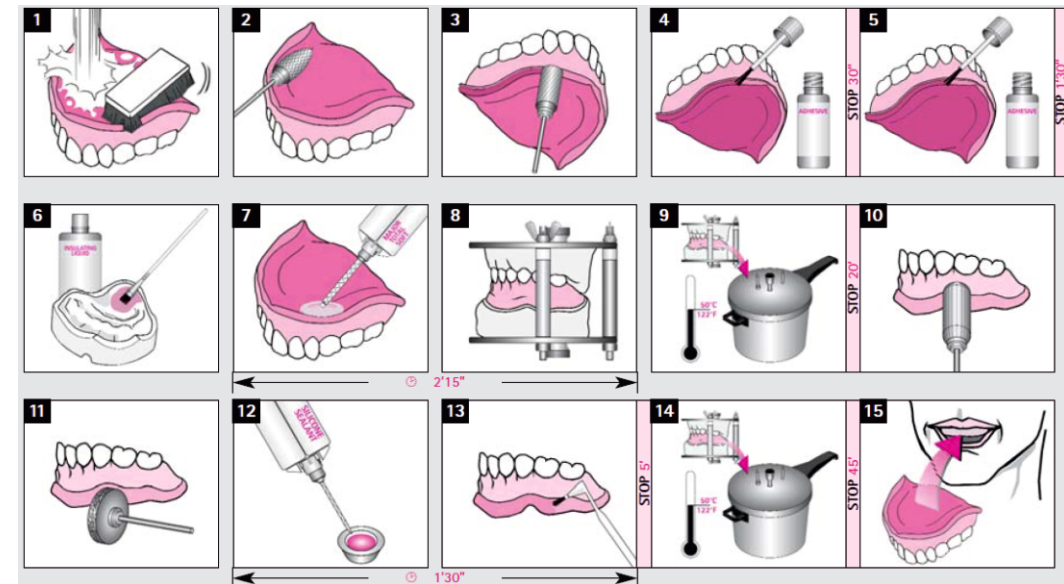

- 1) Protézu omyjte vodou a osušte.
- 2) Obruste požadovanou tloušťku vrstvy.
- 3) Zabruste vestibulárně pravoúhlou hranu.
- 4) Na zbroušené plochy naneste adhezni přípravek MTS Adhesive. Nechte schnout 30“.
- 5) Zopakujte postup bodu 4, nechte schnout 1' 30“.
- 6) Sádrový model opatřete vhodným izolačním přípravkem (mikrofilm).
- 7) Naneste rovnoměrně přípravek Major Total Soft míchací kanylu nechte v materiálu) z důvodu zamezení tvorby vzduchových bublin.
- 8) Protézu dejte do rebazovacího přístroje a **ihned odstraňte přebytečný materiál.**
- 9) Rebazovací přístroj dejte do tlakové nádoby a **polymerizujte při 50°C po dobu 20 minut ve vodní lázni.**
- 10) Přebytečný materiál odstraňte pomocí rotačních nástrojů (ocelová fréзка s příčným zdvihem).

- 11) Proved'te jemné opracování přiloženým leštícím kotoučem, následné leštění pemzou jako obvykle.
- 12) **Opakování obrázku 5!** Adhezivní přípravek MTS Adhesive nechte schnout 1' 30" .
- 13) Přípravek Major Total Soft Sealant naplňte do vhodné nádoby.
- 14) Pomocí štětce naneste tenkou vrstvu přípravku Major Total Soft Sealant do 1' 30" na spojovací linii Major Total Soft (Total Soft - plastická hmota). 5 minut se nedotýkejte.
- 15) Protézu vložte znovu do tlakové nádoby při teplotě vody 50°C a polymerizujte po dobu 45 minut.
- 16) Protéza je hotová k začlenění do dutiny ústní.

Korekce:

Silikon značně obruste, opět naneste Major Total Soft.

Pouze na odkryté části plastické hmoty předtím 2 x naneste štětečkem adhezivní přípravek MTS Adhesive. Nechejte schnout 2 x 1' 30" .

	SPARE PARTS	MAJOR TOTAL SOFT STANDARD SET (CODE C3500)	MAJOR TOTAL SOFT REFILL PACKAGE (CODE C3501)
	C3508 Major Total Soft Cartridge (50 ml)	1 x	2 x
	C3502 Silicone Sealant Cartridge (50 ml)	1 x	-
	C3504 Mixing tips Ø 6,5 mm	6 x	12 x
	C3505 Mixing tips Ø 3,2mm	6 x	-
	C3503 MTS Adhesive (10 ml)	1 x	-
	C3507 Brush Handle	1 x	-
	C3506 Brush	20 x	-
	C3509 Polishing Discs	2 x	-
	C3510 Steel bur	-	-



MAJOR TOTAL SOFT

Trvale měkký rebazovací materiál na bázi polyvynylsiloxanu.

Prostředek na přímou rebazi

Major Total Soft může být použit přímo k optimalizaci stability náhrady a k získání přesnějších hodnot nasazení.

Terapeutický prvek

Major Total Soft se používá po extrakcích zubů nebo po implantologických zákrocích za účelem vytvoření jemné a analergenní podpory pacientovým dásním a pro zajištění rychlého hojení sliznic.

Stabilizační prvek

Major Total Soft lze využít pro úpravu oblastí sliznic, které se liší v odolnosti, ostrých kostnatých hřebenů, nebo hlubokých zářezů, které mohou způsobovat bolesti nebo nestability zubní náhrady.

Provizorní řešení

Major Total Soft lze také použít jako dočasný materiál ve spojení s každým druhem totálních a parciálních náhrad.

Prostředek pro nepřímé rebaze

Major Total Soft použitý v zubní laboratoři pro nepřímou rebazi.

Materiál na opravy

Hmota Major Total Soft a příslušný Silicone Sealant (ošetřovač silikonu) mohou být využity při činnostech, které vyžadují přidání, nebo aplikaci materiálu na náhradu, kterou pacient již několik let nosil.



Váš dodavatel dentálních materiálů

Flava s.r.o.
Lanškrounská 536/31, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 533 323
e-mail: office@flava.cz
www.flava.cz