

HIGHLIGHT EASY – UV lampa

Highlight Easy je přístroj pro polymerizaci pryskyřic a materiálů pro individuální otiskovací lžice.

Technická specifikace:

Rozměry:

Délka: 245 mm

Šířka: 225 mm

Výška: 105 mm

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon: cca. 36W

Světelné spektrum: 4 x 365 nm 9W

Pracovní prostředí:

Sucho při pokojové teplotě.

Vnitřek přístroje můžete čistit prostředky obsahující alkohol.

Highlight Easy se snadno obsluhuje a díky své praktické velikosti nezabírá mnoho pracovního prostoru.

Přístroj je zhotoven v souladu s platnými technickými standardy a s ohledem na všechny známé bezpečnostní směrnice. Přesto by měla být brána v úvahu možnost nebezpečí.

Bezpečnostní pokyny:

Highlight Easy je určen výhradně pro polymeraci světlem tuhoucích pryskyřic.

Použití k jiným účelům není povoleno a výrobce nebude brát žádnou odpovědnost za případné poškození materiálů, přístroje, osob či zvířat.

Výrobce také není zodpovědný za poškození způsobené nesprávným použitím přístroje.

Pro bezpečnou práci je třeba dodržovat zákony o bezpečnosti práce, které jsou platné v jednotlivých zemích.

Než připojíte přístroj do sítě, zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům ze štítku na zadní straně přístroje. Přístroj je možné zapojit pouze k elektrickému zdroji, který odpovídá místním nařízením. Také zkontrolujte, zda není kabel poškozen či zda není zatížen.

Během opravy, čištění či údržby nesmí být přístroj zapojen k síti.

Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaná osoba. Výrobce není zodpovědný za poškození přístroje způsobené neodborným zásahem.

Jsou-li opravovány elektrické části, musí být přístroj znovu zkontrolován, zda odpovídá místním normám.

Bezpečnostní opatření:

Aby nedošlo k přehřátí přístroje, je na jeho horní straně umístěna mřížka. Ta nesmí být během práce zakrytá.

Přístroj musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od topných zařízení.

Je-li přístroj poškozen, odpojte jej od sítě.

Nyní již není zajištěna bezpečná práce. Zamezte dalšímu používání přístroje, dokud není opraven.

Abyste předešli nechtěné polymeraci, nepokládejte světlem tuhnoucí materiály před přístroj.

Upozornění:

Nedívejte se do zdroje světla.

Při potřísnění vodou zařízení vypněte.

Pro připojení přístroje používejte pouze uzemněnou zásuvku.

Zajistěte, aby do styku s přístrojem nepřišly osoby neproškolené (např. děti)

Návod na použití:

Při vybalování se ujistěte, že není přístroj poškozen.

V případě poškození vraťte přístroj dodavateli včetně faktury a dodacího listu, který obsahuje výrobní číslo přístroje.

Poškození způsobená nesprávným transportem, budou bezprostředně reklamována u autorizovaného dopravce.



FLAVA s.r.o., Lanškrounská 536/31, Předměstí, 56802 Svitavy, Česká republika

Tel. +420 461 533 323, Fax.: +420 461 531 129

e-mail: office@flava.cz, www.flava.cz

DIČ: CZ647 88 202

Umístění přístroje:

Přístroj musí být umístěn horizontálně na rovné a neposuvné pracovní ploše, stranou od topných zařízení. Věnujte pozornost dostatečnému prostoru pro hlavní spínač a zajistěte, aby byla chladicí mřížka polymerizační komory volná.

Před prvním zapnutím počkejte, až přístroj dosáhne pokojové teploty.

Pracovní postup:

Přesvědčte se, že zářivky nejsou poškozené.

Zářivky opatrně umístěte do objímky.

Před zapnutím síťové šňůry si musíte být jisti, že napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na štítku na zadní straně přístroje.

Pracovní model umístěte dovnitř přístroje.

Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.

Dobu polymerace nastavíte tlačítky na zadní straně přístroje.

časovač 120 sekund, nebo kontinuálně

Polymerace proběhne automaticky.

Po uplynutí nastaveného času přístroj automaticky ukončí polymeraci.

Vypněte přístroj.

Životnost zářivek je cca 450 hodin.



FLAVA s.r.o., Lanškrounská 536/31, Předměstí, 56802 Svitavy, Česká republika
Tel. +420 461 533 323, Fax.: +420 461 531 129
e-mail: office@flava.cz, www.flava.cz
DIČ: CZ647 88 202