

Návod k použití

Megaseal N

světlem tuhnoucí povrchový uzavírací lak vyztužený nanočásticemi

Megaseal N vlastnosti a výhody:

- snadná a rychlá aplikace
- vysoká oděruodolnost
- výborný lesk
- možno polymerovat ve všech polymeračních pecích

1. Produkt Megaseal N je určen k utěsnění plastových a keramických povrchů, částí protéz a plastových dlah, ortodontických aparátů a provizorních náhrad a v C+B technice.

2. Megaseal se nanáší tence a rovnoměrně štětečkem. Pro dobrou přilnavost by měl být povrch suchý a odmaštěný. Vrstva by měla být tenká. Jestli je požadována silná vrstva laku, je potřeba aplikaci rozdělit na dva a více kroků a vždy jednotlivě polymerovat. Polymerace by měla být provedena v polymerační jednotce s UV- nebo s modrým světlem s vlnovou délkou 320 - 500 nm. Podle intenzity polymerační jednotky by doba vytvrzení měla být 3 - 5 minut.

3. Technický údaje a upozornění!

Megaseal N obsahuje metylmetakrylát. To je hořlavá kapalina. Vyhýbejte se ohni. Nevdechujte, vyvarujte se kontaktu s kůží nebo očima.

Obsahuje: Methylmethacrylate, polyakrylát, Photoinitiator, Stabilisator, Nanoparticules (SiO₂ base)

4. Skladovatelnost 2 roky

5. Balení: 20 ml láhev s kartáčem. Obj. číslo.: MG2VLACK-N2



FLAVA s.r.o., Lanškrounská 653/25, Předměstí, 56802 Svitavy, Česká republika
Tel. +420 461 533 323
e-mail: office@flava.cz, www.flava.cz
DIČ: CZ647 88 202