

MAJOR SUPER LUX – NÁVOD K POUŽITÍ



MAJOR CZ s.r.o.
Lanškrounská 653/25,
568 02 Svitavy, Czech Republic
IČ: 25287834

Určený účel:

Syntetické polymerní zuby pro zubní protézy.

Indikace / určená populace:

Pro všechny pacienty a všechny protézy.

Určený uživatel:

Použití je omezeno na oprávněné zubní lékaře, dentální techniky a odborný personál pod jejich dohledem.

Zpracování:

Zuby se klasickým způsobem staví do voskové šablony, kde se vyartikulují v artikulátoru (se simulací žvýkacích pohybů) nebo na okludoru. Dále se pokračuje běžným pracovním postupem kyvetace. Při izolování sádry v kyvetě je třeba dbát na to, aby izolačním materiálem nebyly pokryty pryskyřičné zuby v místě, kde mají být spojeny s bazální pryskyřicí. Retenci v pryskyřici je možné zvýšit zdrsněním spodních ploch zubů a zvlhčením monomerem. K vyplnění formy se použije pryskyřičné těsto správné konzistence.


Vlastnosti z hlediska účinnosti:

Splňují požadavky normy EN ISO 22112:2017.


Poznámky:

- Další informace jsou uvedeny v příloženém katalogu.
- Přesný typ zubů je vyznačen v popiscích pomocí zkratk. Pro podrobnou identifikaci použijte dodaný katalog.
- Systém vytváření šarží: RRDDD, kde RR znamená rok a DDD znamená pořadový den roku výroby.
- Reklamační řád: Pro uznání reklamace musí být k dispozici číslo šarže (LOT) a informace o tvaru a barvě výrobku.

Destička – vysvětlivky

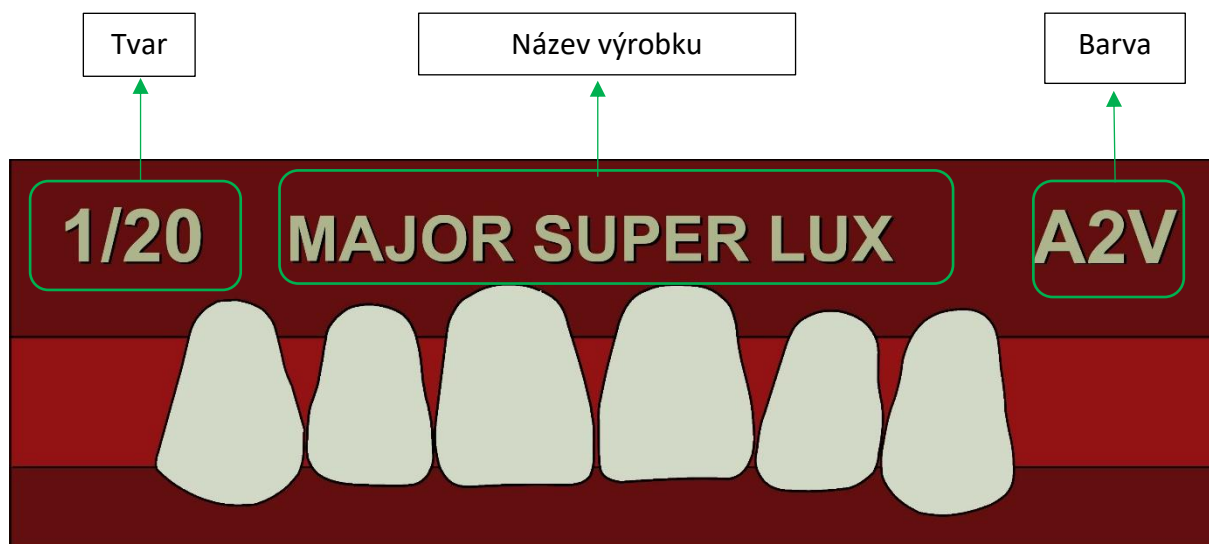

Štítky – vysvětlivky:

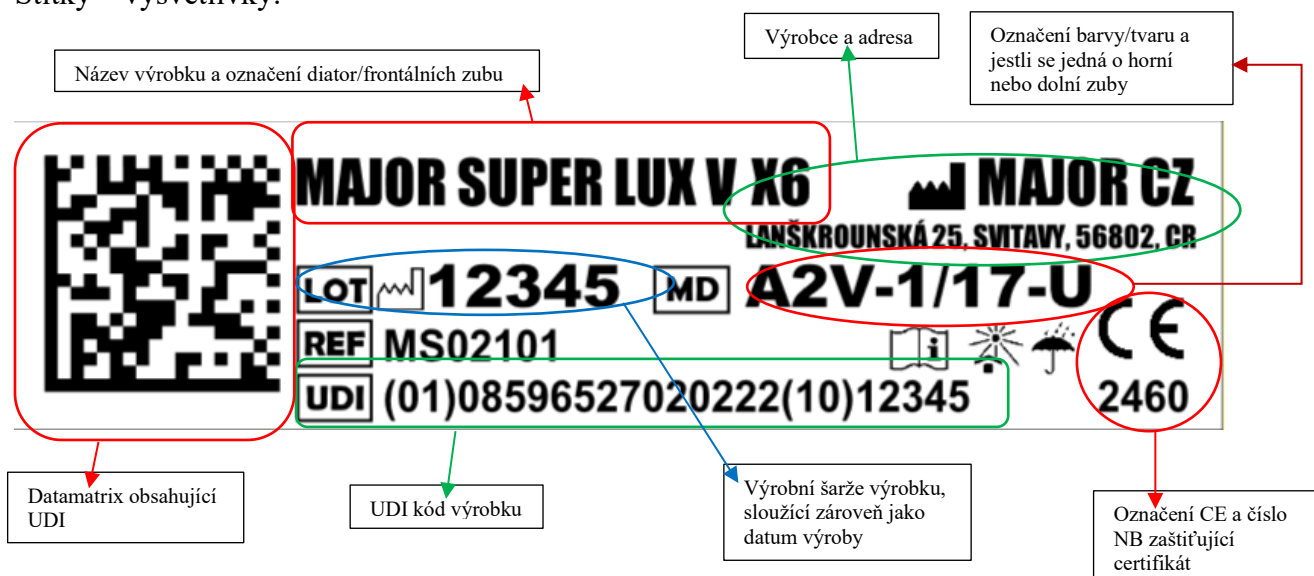

Upozornění:

- Instruuje pacienta, aby si osvojil denní hygienické návyky.
- Doporučte pacientovi, aby se vyhýbal nadměrnému čištění zubů, které by mohlo způsobit abrazivní opotřebení, a aby zabránil styku s louhy, kyselinami nebo jinými látkami, které mohou poškodit akrylové materiály.
- Pro zajištění optimálního spojení se základní pryskyřicí zubní náhrady před nastavením obrousit zuby na krčku, odstranit vosk a odmastit drhnutím metylmetakrylátu monomeru.
- Předměty, které přicházejí do styku s pacientem, pokud nejsou dezinfikovány, představují riziko infekce.
- Správně zuby zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Částice (prach), které vznikají při broušení, mohou být nebezpečné. Nevdechujte je; používejte mechanické odsávání; přijměte vhodné ochranné prostředky. Platí TLV a TWA.
- Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, který vedla nebo by mohla vést k úmrtí pacienta nebo jiné osoby, k dočasnému nebo trvalému vážnému zhoršení zdravotního stavu pacienta nebo jiné osoby nebo k ohrožení veřejného zdraví, by měla být nahlášena výrobci a příslušnému národnímu orgánu.

Skladování:

- Výrobek je nutno skladovat mimo dosah přímého slunečního svitu, z důvodů zabránění změn barevnosti v důsledku degradace barevného pigmentu.
- Výrobek je nutno skladovat v suchém prostředí, aby nedošlo k poškození, nebo odlepení identifikačního štítku, případně k poškození krabičky, ve které byl výrobek dodán
- Výrobek je doporučeno skladovat za běžných pokojových teplot (cca 10°C-35°C). Důvodem je, že mimo tento rozsah nelze zaručit že zuby budou držet ve vosku na destičce a nevypadnou.

Vydáno: 11/02/2026
Revize č.: CZ/MDR-2