

Secret Agent NÁVOD K POUŽITÍ – CZ

Secret Agent. Separační prostředek pro tisk 3D modelů

Popis produktu

Vlastnosti produktu: Separační prostředek pro oddělení povrchu 3D modelu z pryskyřice od akrylu.

Indikace pro použití: Pomocné práce v zubních laboratořích. Oddělení chladné akrylové pryskyřice od 3D tištěného modelu z pryskyřice při výrobě desek pro ortodontické aparátky nebo opravy zubních protéz.

Kontraindikace

Nepoužívejte u osob, které mají alergické reakce na ethylalkohol.

Forma produktu

Kapalina, prášek

Složení produktu

Kapalina: ethylalkohol, barvivo

Prášek: síran sodný, CTMABr

Bezpečnostní pokyny

Upozornění

Kapalina

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

P210 Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, zdrojů jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte.

P233 Uchovávejte nádobu dobře uzavřenou.

P370+P378 V případě požáru: Použijte k hašení práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý .

P403+P235 Skladujte v dobře větraném prostoru. Skladujte v chladu.

P501 Obsah/nádobu odveďte do autorizovaného sběrného dvora nebo vraťte dodavateli.

Prášek

H400 Velmi toxický pro vodní organismy.

P273 Zabraňte úniku do životního prostředí.

P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v schváleném zařízení pro likvidaci odpadů nebo vraťte dodavateli.

Bezpečnostní opatření

V případě alergické reakce okamžitě přestaňte pracovat a vyhledejte dermatologa.

Zákaz kouření při práci s produktem.

P261 Zabraňte vdechování prachu/kouře/plynu/mlhy/par/aerosolu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to možné a snadné. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění je vhodné kontaktovat lékaře.

P312 Při nevolnosti zavolejte toxikologické informační centrum nebo lékaře.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu dobře uzavřenou.

P235 Uchovávejte v chladu.

P501 Obsah/nádobu zlikvidujte v schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Skladovací podmínky produktu

Skladujte složky produktu v původním, těsně uzavřeném obalu, v tmavé a dobře větrané místnosti, při teplotě 5–25 °C, mimo dosah neoprávněných osob.

Likvidace odpadu

Likvidujte v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady z podnikání. Kartonové obaly, etikety, návody: nezávadný tříděný komunální odpad – papír.

Prášek: nebezpečný odpad, postupujte podle předpisů pro nakládání s nebezpečným odpadem (skladování, přeprava a likvidace) a odevzdejte profesionálnímu sběrateli nebezpečného odpadu.

Obaly na prášek: neškodný tříděný komunální odpad – plast.

Kapalina a obaly na kapaliny – nebezpečný odpad, postupujte podle předpisů pro nakládání s nebezpečným odpadem (skladování, přeprava a likvidace) a odevzdejte profesionálnímu sběrateli nebezpečného odpadu.

Návod k použití

Vytisknutý model důkladně omyjte isopropylalkoholem v ultrazvukové čističce a vytvrdte v polymerizační lampě podle doporučení výrobce pryskyřice.

Proces důkladného omytí a vytvrzení v UV lampě je zásadní pro správnou funkci izolačního prostředku a oddělení akrylové pryskyřice od 3D tištěného modelu. Proces vytvrzování a izolace tímto materiálem umožňuje bezproblémové použití vytvrzovacích silikonů typu A pro modely a vtokovou injektáž..

Okamžitě po tisku, omytí alkoholem a vytvrzení v UV lampě proveďte dodatečné vytvrzení 3D tištěného pryskyřičného modelu pomocí prášku Secret Agent Powder.

K tomu rozpustíte dvě odměrky prášku Secret Agent Powder ve vodě o teplotě 40–50 °C. Ponořte tištěný model – předem omytý isopropylalkoholem – do roztoku na 5–10 minut. Poté model omyjte pod tekoucí vodou a osušte.

Pomocí štětce naneste malé množství Secret Agent Liquid na čistý povrch 3D tištěného modelu připraveného výše uvedeným způsobem a rovnoměrně ho rozetřete po celém povrchu modelu. Počkejte 5–6 minut (při 23 °C), až se rozpouštědlo v materiálu odpaří.

Poté zkontrolujte, zda se na modelu vytvořila tenká vrstva, která nelepí na prst. Na takto připravený povrch lze nanést akrylovou hmotu a vytvrdit za podmínek stanovených výrobcem akrylové pryskyřice. Po dokončení polymerizace a ochlazení materiálu sejměte z modelu práci vyrobenou z akrylu.

Izolátor vytváří velmi tenkou vrstvu a navíc se rozpouští ve vodě, takže jej lze snadno odstranit z modelu z 3D pryskyřice a vytvrzeného akrylu.

POZNÁMKA: Využijte pouze pro akrylovou polymeraci do 65 °C, není vhodný jako separační prostředek pro polymerované termální akryláty vytvrzované vařením ve vodě.

Číslo šarže a datum spotřeby – viz potisk na etiketách a obalech výrobků.

Datum spotřeby se vztahuje na neotevřené balení správně skladované. Nepoužívejte výrobek po uplynutí data spotřeby.

Další informace

Hlášení závažných incidentů: Jakékoli závažné incidenty související s výrobkem by měly být hlášeny výrobci a příslušnému orgánu v souladu s místními předpisy.

Referenční číslo, název výrobku, velikost balení, číslo šarže a datum spotřeby – viz potisk na obalu výrobku.

Dostupné balení Secret Agent

Kit- prášek + kapalina 40 g + 2×10 ml nebo 300 g + 150 ml

Kapalina 10 ml, 150 ml

Prevence problémů

Viz: www.everall7.pl

Jakékoli připomínky k našim výrobkům zasílejte na naši adresu.

Podrobné informace o všech materiálech Everall7 získáte na telefonním čísle: +48 602 701 001

Informace poskytnuté jakýmkoli způsobem, i během předváděcích akcí, nemají vliv na platnost návodu k použití. Uživatelé jsou povinni se ujistit, že produkt je vhodný pro zamýšlené použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody, včetně škod způsobených třetím osobám, vzniklé v důsledku nedodržení pokynů nebo nevhodnosti pro použití. Odpovědnost výrobce je v každém případě omezena na hodnotu dodaných produktů.

Použité symboly



Expirace



Uchovávejte v temnu



Výrobní číslo



Upozornění



Katalogové číslo



Výrobce



Návod k použití



Hořlavina GHS 01



Hraniční teploty pro uskladnění

Rev. 2025-09



Everall7 Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14 | 02-981 Warszawa; Polska

T +48 22 858 82 72 | info@everall7.pl

www.everall7.pl

