

MAJOR SUPER LUX – NÁVOD K POUŽITÍ

Pro syntetické polymerní zuby pro zubní protézy a vzorníky zubů MAJOR SUPER LUX



MAJOR CZ s.r.o.
Lanškrounská 653/25,
568 02 Svitavy, Czech Republic
IČ: 25287834



Určený účel:

Syntetické polymerní zuby pro zubní protézy

Indikace / určená populace:

Pro všechny pacienty a všechny protézy.

Určený uživatel:

Použití je omezeno na oprávněné zubní lékaře, dentální techniky a odborný personál pod jejich dohledem.

Zpracování:

Zuby se klasickým způsobem staví do voskové šablony, kde se vyartikulují v artikulátoru (se simulací žvýkacích pohybů) nebo na okludoru. Dále se pokračuje běžným pracovním postupem kyvetace. Při izolování sádry v kyvetě je třeba dbát na to, aby izolačním materiálem nebyly pokryty pryskyřičné zuby v místě, kde mají být spojeny s bazální pryskyřicí. Retenci v pryskyřici je možné zvýšit zdrsněním spodních ploch zubů a zvlhčením monomerem. K vyplnění formy se použije pryskyřičné těsto správné konzistence.


Vlastnosti z hlediska účinnosti:

Splňují požadavky normy EN ISO 22112:2017.

Poznámky:

- Jednotlivé varianty zubů jsou označeny specifickými identifikačními kódy, které slouží výhradně k určení barvy a tvaru zubu.
- Přehled všech tvarů a barevných odstínů je uveden v katalogu zubů MAJOR SUPER LUX.
- Systém vytváření šarží: RRDDD, kde RR znamená rok a DDD znamená pořadový den roku výroby.
- Reklamační řád: Pro uznání reklamace musí být k dispozici číslo šarže (LOT) a informace o tvaru a barvě výrobku.
Pro reklamaci použijte reklamační formulář, který je ke stažení na stránkách Flava.cz

DESTIČKA – VYSVĚTLIVKY:

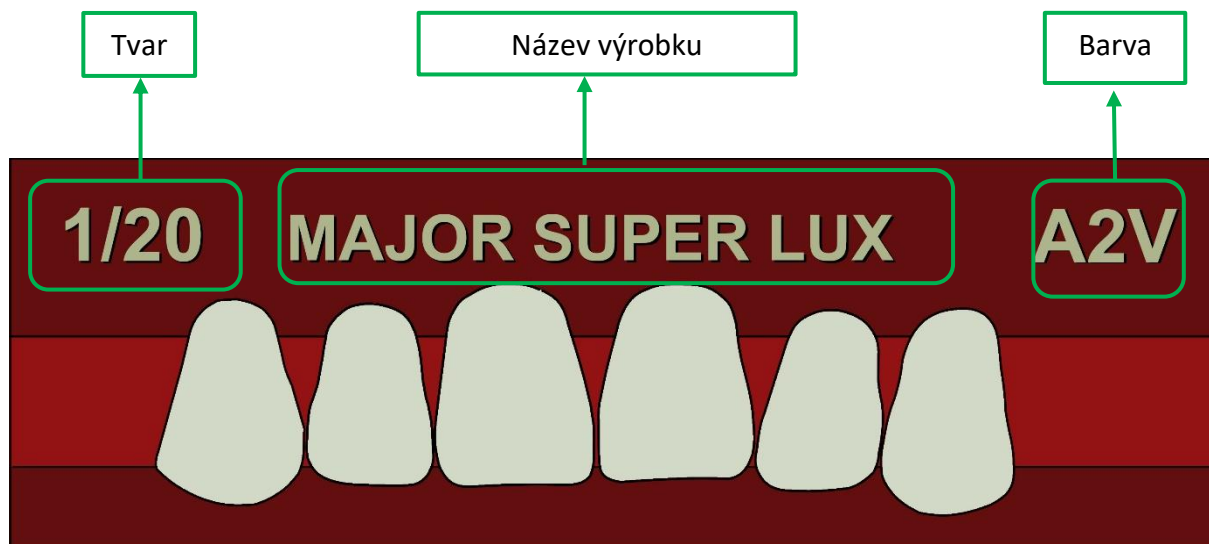

ŠTÍTKY – VYSVĚTLIVKY:



UPOZORNĚNÍ:

- Instruuje pacienta, aby si osvojił denní hygienické návyky.
- Doporučte pacientovi, aby se vyhýbal nadměrnému čištění zubů, které by mohlo způsobit abrazivní opotřebení, a aby zabránil styku s louhy, kyselinami nebo jinými látkami, které mohou poškodit akrylové materiály.
- Pro zajištění optimálního spojení se základní pryskyřicí zubní náhrady před zpracováním zuby v oblasti krčku lehce zdrsňte. Odstraňte veškeré zbytky vosku a povrch očistěte a odmastěte pomocí metylmetakrylátového monomeru.
- Předměty, které přicházejí do styku s pacientem, pokud nejsou dezinfikovány, představují riziko infekce.
- Výrobek a obalové materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Výrobek a obalové materiály nejsou uvedeny v seznamu nebezpečných odpadů dle směrnice C.D. 2008/98/ES 1(4). Materiály, které přišly do kontaktu s pacientem, představují riziko infekce i při likvidaci (seznam nebezpečných odpadů EU č. 180103).
- Při broušení vzniká prach, který může při vdechování způsobit podráždění dýchacích cest. Používejte lokální odsávání a vhodné osobní ochranné prostředky, zejména ochranné brýle a ochranu dýchacích cest. Expozice prachu musí být řízena tak, aby byly dodrženy platné hygienické limity pro prach v pracovním prostředí stanovené příslušnými národními předpisy.
- Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu materiálu a příslušné národní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, který vedla nebo by mohla vést k úmrtí pacienta nebo jiné osoby, k dočasnému nebo trvalému vážnému zhoršení zdravotního stavu pacienta nebo jiné osoby nebo k ohrožení veřejného zdraví, by měla být nahlášena výrobci a příslušnému národnímu orgánu.

Skladování zubů MAJOR SUPER LUX a vzorníků MAJOR SUPER LUX

- Výrobek (platí jak pro zuby, tak pro vzorníky), je nutno skladovat mimo dosah přímého slunečního svitu, a to z důvodu zabránění změn barevnosti v důsledku degradace barevného pigmentu.
- Výrobek je nutno skladovat v suchém prostředí, aby nedošlo k poškození, nebo odlepení identifikačního štítku, případně k poškození krabičky, ve které byl výrobek dodán
- Výrobek je doporučeno skladovat za běžných pokojových teplot (cca 10 °C-25 °C), mimo tento rozsah nelze zaručit že zuby budou držet ve vosku na destičce.
- Správné použití vzorníků zubů: Pro kontrolu shody odstínu setu se vzorníkem je nejprve nutné zajistit jednotné osvětlení z jednoho světelného zdroje. Následně připravte set tak, že z něj vyjmete jeden až dva zuby (v závislosti na velikosti zubů v setu). Do vzniklého prostoru poté umístěte odpovídající zub ze vzorníku. Shodu odstínů porovnávejte v centrální, nejmohutnější části zubu, protože okrajové části jsou vlivem vlastností materiálu částečně průsvitné a mohou se od centrální části barevně lišit.

Vydáno: 17/06/2026
Revize č.: CZ/MDR-3