

# Návod k použití



## Major Super Lux

Aktualizováno 01/2016

### 1. Identifikace produktu a výrobce

1.1 Identifikace produktu: pryskyřičné třívrstvé zuby do snímatelných zubních náhrad

1.2 Údaje o výrobci: MAJOR CZ s.r.o.  
Lanškrounská 536/31  
568 02 SVITAVY  
tel.: 461 533 323  
e-mail: [office@flava.cz](mailto:office@flava.cz)  
[www.flava.cz](http://www.flava.cz)

### 2. Indikace

Celkové snímatelné náhrady.  
Částečné snímatelné náhrady.  
Immediátní náhrady.

### 3. Zpracování:

Zuby se klasickým způsobem staví do voskové šablony, kde se vyartikulují v artikulátoru (se simulací žvýkacích pohybů) nebo na okludoru. Dále se pokračuje běžným pracovním postupem kyvetace. Při izolování sádry v kyvetě je třeba dbát na to, aby izolačním materiálem nebyly pokryty pryskyřičné zuby v místě, kde mají být spojeny s bazální pryskyřicí. Retenci v pryskyřici je možné zvýšit zdrsněním spodních ploch zubů a zvlhčením monomerem. K vyplnění formy se použije pryskyřičné těsto správné konzistence.

### 4. Nakládání s odpady:

Prázdný obal a nepoužitý zbytek materiálu likvidujte společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti.

### 5. Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 30 °C, v dobře uzavřeném obalu.

### 6. Doba použitelnosti:

Neomezeně při správném skladování.

### 7. Balení:

Frontální zuby – 18 setů, každý set se 6 zuby, celkem 108 zubů v balení.

Diatorické zuby – 12 setů, každý set se 8 zuby, celkem 96 zubů v balení.

Kompletní zubní sady – 4 garnitury, každá se 4 sety, celkem 112 zubů.

### 8. Odstíny:

SUPER LUX A1-C3

SUPER LUX VITA A1V-D4V